



WARTNER KALKNAGELPEN

WAT IS WARTNER KALKNAGELPEN?

Wartner Kalknagelpen is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van kalk- en schimmelnagels. Lees voor gebruik de hele gebruiksaanwijzing.

De 3in1 formule is niet alleen effectief tegen kalknagels maar vermindert ook verkleuring van de nagels en voorkomt verspreiding van de kalknagel.

De formule dringt door de lagen van de nagel heen en pakt zo de kalknagel bij de bron aan. Wartner Kalknagelpen gaat de verdere groei van schimmels tegen en beschermt de nieuwe nagelgroei tegen infectie.

De Wartner Kalknagelpen bevat een kleurloze vloeistof in een pen met een draaisysteem. De pen is makkelijk en precies in gebruik door de speciaal ontwikkelde kwastapplicator die in een handomdraai de gepaste dosering geeft. Eén pen bevat voldoende vloeistof voor de behandeling van 1 nagel gedurende 4 maanden.

TOEPASSING

De Wartner Kalknagelpen wordt gebruikt voor de behandeling van kalknagels en de verbetering van het uiterlijk van de nagel.

HOE WERKT WARTNER KALKNAGELPEN?

Wartner herstelt het uiterlijk van de aangedane nagel(s) en vermindert verkleuring. Klinische studies met deze formule tonen bij de meeste personen zichtbaar resultaat binnen 2 weken*. Indien na 3 maanden nog geen enkel resultaat zichtbaar is, raadpleeg uw arts om eventuele aanvullende behandeling te bespreken.

GEbruIKSAANWIJZING

Verwijder eventuele nagellak voor u Wartner aanbrengt. Het is niet nodig de nagel te vijlen voor gebruik van Wartner.

Breng Wartner 1 keer per dag aan op een schone, droge nagel, bij voorkeur voor het slapen gaan:

1. Verwijder de dop.
2. Draai het uiteinde van de pen totdat er vloeistof op de applicator zichtbaar wordt. Bij een eerste gebruik kan tot 20 seconden draaien nodig zijn.
3. Breng een dun laagje vloeistof aan op de aangedane nagel(s). Vermijd zoveel mogelijk de huid rondom de nagel om huidirritatie te voorkomen.
4. Sluit de pen goed af met de dop.
5. Nagel(s) enkele minuten laten drogen.

Behandel de kalknagel(s) voor het beste resultaat elke dag totdat de gezonde nagel geheel is terug gegroeid en de gehele nagel er weer gezond uitziet. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de kalknagel. (De uitgroeiperiode van vingernagels is 6-8 maanden, van voetenagels 8-12 maanden). Het product werkt alleen op de nagel en kan daarom gebruikt worden tijdens zwangerschap of borstvoeding. Ervaringen met het gebruik van Wartner Kalknagelpen bij kinderen zijn beperkt. Raadpleeg eerst een arts alvorens kinderen te behandelen.

Om besmetting te voorkomen dient de pen slechts door 1 persoon gebruikt te worden en alleen op kalknagels. Om kalknagels te voorkomen kunt u Wartner Kalknagelpen ook preventief gebruiken.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Door het gebruik van het product kan in sommige gevallen een lichte irritatie van de huid ontstaan rondom de nagel.

Een kalknagel is een verdikte, verkleurde nagel, in sommige gevallen kan de nagel, door de infectie, loslaten van het nagelbed.

BEWAARADVIES

Volg onderstaande bewaaradviezen om de kwaliteit en werkzaamheid te helpen behouden:

- Plaats de dop altijd stevig terug op de pen na gebruik.
- Niet gebruiken na de datum die vermeld staat op pen en doosje.
- Bewaren bij kamertemperatuur.

Wartner Kalknagelpen bevat voldoende vloeistof voor ± 140 applicaties.



WAARSCHUWING

Alleen voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen om irritatie te voorkomen. In geval van inslikken of indien allergische reacties optreden, raadpleeg een arts. Bewaar buiten bereik en buiten het zicht van kinderen. De dop kan verstikking veroorzaken als deze door kinderen wordt ingeslikt. Bewaren op kamertemperatuur.

Wartner Kalknagelpen is een medisch hulpmiddel.



FABRIKANT

Pharma Source BV
Reduittaan 33
4814 DC Breda
The Netherlands

DISTRIBUTEUR

Omega Pharma Nederland B.V., Rotterdam
Consumentenservice: 010 - 221 10 07

INGREDIËNTEN: De formule bevat o.a. propyleenglycol en melkzuur.

LAATSTE HERZIENING: april 2019

*77% van de gebruikers zag binnen 2 weken resultaat, 88% zag resultaat binnen 4 weken. Test uitgevoerd onder 73 gebruikers.



2797



13122BS.3
900106v3